

INSTRUKTIONSBOG

Brugermanual



ROLLATOR MED
BREMSE OG KURV

TILLYKKE MED DIN NYE ROLLATOR

Kære kunde

Tak fordi du valgte vores rollator. Denne vejledning indeholder vigtig information om din rollator og dens funktioner.

Læs manualen grundigt igennem, inden rollatoren tages i brug. Forkert brug af rollatoren, kan medføre skader eller kvæstelser.

Denne vejledning er at betragte som en del af rollatoren og skal derfor altid følge denne. Visse illustrationer og beskrivelser i denne vejledning kan afvige fra den model, du har. Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden forudgående varsel.

Der tages forbehold for trykfejl.

Hvis du har spørgsmål til din rollator, kan du rette henvendelse til den thansen.dk filial, du har købt rollatoren hos eller til vores kundeservice på telefon 31 31 31 31, som altid sidder klar til at hjælpe.

Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye rollator.

INTRODUKTION AF KØRETØJET

- Begynd ikke at justere eller benytte din rollator før du har læst denne vejledning.

MONTAGEVEJLEDNING

- Tag alle delene ud af kassen.
- Åbn rammen ved at skubbe ned på den hængslede foldemekanisme til emnet er i niveau.
- Fastgør bakke, håndtag og kurv
- Sæt håndtagene på rollatorens ramme, sørg for at kablerne er uden på rammen
- Løsn boltene og højdejusteringsgrebet
- Indstil håndtagene i en højde så de passer til brugerens højde. Indsæt boltene fra indersiden, så hovedet passer i hullet
- Placer afstandsskiven og spændehåndtaget på boltene på ydersiden af rammen, og skru fast til.
- Hæng kurven på forsiden af rollatoren på de dertil indrettede kroge.

BRUGS- OG SIKKERHEDSVEJLEDNING

> BRUGERVÆGT: MAX 130 KG.

- Sikr at rollatoren er helt åben, sædet er nede og håndtaget under sædet er skubbet til lukket position.
- Vær sikker på at alle håndtag og højdejusteringer er fastgjort og at hjul og andre bevægelige dele er i god stand før rollatoren bruges.

- Sikr at begge højdejusteringshåndtag er spændt fast til, og at håndtagene sidder i samme højde.
- Test håndbremsene før rollatoren tages i brug. Når bremsen er trukket, bør baghjulene ikke kunne køre rundt. Hvis baghjulene stadig kører mens man bremses, skal rollatoren justeres. Når bremsene slippes, skal baghjulene kunne køre frit.
- Udskift hjulene hvis de bliver slidte eller ødelagte.
- Alle hjul skal være i kontakt med underlaget ved brug. Dette sikrer at rollatoren er velafbalanceret.

> FOR AT HINDRE AT ROLLATOREN VÆLTER:

- Undgå at række efter ting som er så langt væk at du skal rykke fremad på sædet.
- Undgå at hænge ting på rollatoren. Alt bør lægges i kurven eller i den dertil indrettede stokkeholder.
- Rygstøtten (hvis sådan en medfølger) er ikke designet til at bære kropsvægten.
- Hvis du skal samle noget op, placer begge fødder solidt på underlaget og ræk ned mellem knæene.
- Tilfør ikke noget til din vægt når du sidder.

Ovennævnte situationer kan medføre forkert vægtfordeling og medføre at rollatoren vælter med risiko for personskade. Vær altid ekstra opmærksom når du rækker ud efter ting.


- Bremserne skal være låst når du bruger sædet.
- Brug ikke sædet hvis underlaget er ujævnt.
- Sid ikke på sædet mens en anden person skubber dig.
Denne rollator er udelukkende tænkt som hjælp til gåture, og er ikke et transportmiddel.

HÅNDBREMSEINSTRUKTION

> BRUG ALTID BEGGE HÅNDBREMSE SAMTIDIG.


For at nedsætte farten eller stoppe rollatoren midlertidigt:

- Træk bremserne op med fingrene til rollatorens tempo nedsættes eller stoppes.

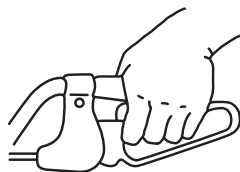

For at bremse hjulene mere permanent:

- Stå mellem håndtagene og pres de afrundede dele nedad med håndfladen. Du vil føle og høre et "klik" når hjulene er låst.

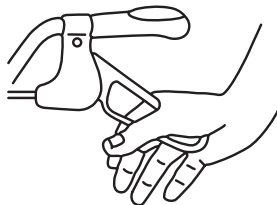

For at løsne bremsen:

- Stå mellem håndtagene og skub den afrundede del op med håndfladen til den oprindelige position.

